

Gebrauchsanleitung: SoftAirSeat Hybrid von TecSeat

Der **SoftAirSeat Hybrid** der Firma TecSeat ist ein innovatives, selbstaufblasendes orthopädisches Sitzkissen für maximalen Komfort und effiziente Druckentlastung beim Sitzen – überall und jederzeit.

1. Lieferumfang prüfen

- SoftAirSeat Hybrid Sitzkissen
- Transportbeutel mit Zugseil
- Produktaltschachtel/Verpackung aus Recyclingpapier

2. Erste Inbetriebnahme

Auspacken & Entfalten:

- Entnehmen Sie das Sitzkissen aus dem Beutel und entfalten Sie es vollständig auf einer ebenen Fläche.

Ventil öffnen:

- Das Ventil befindet sich seitlich am Kissen.
- Schrauben Sie das Ventil auf: Das Kissen bläst sich dank seines speziellen Schaumstoffkerns von selbst auf. Warten Sie ca. 30 Sekunden.

Härte und Sitzhöhe einstellen:

- Testen Sie das Sitzgefühl („probesitzen“).
- Für **mehr Sitzhöhe und eine festere Fläche** blasen Sie zusätzlich Luft ein (durch das offene Ventil leicht hineinpusten).
- Für **weniger Höhe und ein weicheres Sitzen** lassen Sie etwas Luft über das Ventil entweichen.

Ventil schließen!

- Sobald die gewünschte Festigkeit erreicht ist, schließen Sie das Ventil wieder fest.

3. Anwendung & Sitzposition

- Platzieren Sie das Kissen auf die Sitzfläche Stuhl, Autositz, Rollstuhl, Stadionbank, etc.).
- Achten Sie darauf, dass die ergonomisch geformte Seite und eventuelle Aussparungen (zur Druckentlastung von Steiß- und Sitzbeinen) korrekt positioniert sind.
- Setzen Sie sich mittig auf das Kissen, passen Sie ggf. noch einmal die Luftmenge an Ventil kurz öffnen/schließen).

4. Einstellungen für verschiedene Untergründe

- **Weiche Sitzfläche (z. B. Sofa/Polstersessel):** Etwas mehr Luft einfüllen für besseren Halt.
- **Harte Untergründe Holz, Kunststoffstühle):** Weniger Luft genügt für weiches, komfortables Sitzen.

5. Zusammenfalten & Transport

- Zum Verpacken das offene Ventil aufdrehen.
- Das Kissen der Länge nach langsam ! von der gegenüberliegenden Seite zum Ventil hin aufrollen, damit Luft entweichen kann.
- Ventil schließen, Kissen zusammengefaltet im Transportbeutel verstauen. So passt es in jede Tasche oder den Rucksack.

6. Pflege & Wartung

- Oberflächen bei Bedarf einfach feucht abwischen.
- Das Material ist unempfindlich gegen Wasser, Feuchtigkeit, Frost und Regen.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung und dauerhafter Hitze schützen.
- Keine scharfen Gegenstände auf das Kissen legen, um Materialschäden zu vermeiden.

7. Wichtige Hinweise & Tipps

- Die Sitzhärte/Luftfüllung sollte regelmäßig geprüft und nachjustiert werden, besonders bei Temperaturwechseln und häufigem Gebrauch. Das Kissen ist für Kinder und Erwachsene geeignet.
- Ideal bei langem Sitzen, nach Steißbeinoperationen, für Reisen oder als Komfort-Upgrade auf älteren Stühlen.
- Belastbar und für dauerhaftes Sitzen ausgelegt.

Gebrauchsvorteile:

- Entlastet Wirbelsäule, Steißbein & Sitzbeine dank ergonomischem Design
- Fördert gesunde Rückenhaltung („aktives Sitzen“)
- Keine Ermüdung, maximaler Komfort, individuell anpassbar
- Für Zuhause, Büro, Auto, Reisen und Outdoor.

Bei Fragen oder Problemen beachten Sie die FAQs und Kundenhinweise auf der Herstellerseite.

Ihr TecSeat SoftAirSeat Hybrid – für gesundes, schmerzfreies Sitzen überall.