

# Gebrauchsanleitung für den SoftAirSeat Basic+

Der **SoftAirSeat Basic+** von TecSeat ist ein besonders kompaktes, selbstaufblasendes orthopädisches Sitzkissen für Komfort überall – ideal, wenn *geringer Platzbedarf* und *minimales Gewicht* gefragt sind.

## 1. Lieferumfang prüfen

- SoftAirSeat Basic+ Sitzkissen
- Transportbeutel
- Verpackung (Anleitung auf der Rückseite)

## 2. Erste Inbetriebnahme

- Kissen aus dem Transportbeutel entnehmen und auf einer glatten Unterlage auseinanderfalten.
- **Ventil öffnen:** Die seitlichen Ventile vollständig aufdrehen – Mit dem Mund Luft einblasen bis das Kissen ca. bis zur Hälfte gefüllt ist.

### Sitzhärte anpassen:

- Für **mehr Festigkeit:** Mit dem Mund etwas zusätzliche Luft einblasen.
- Für **weicheres Sitzen:** Das Ventil nur etwas öffnen, leicht zusammendrücken, gewünschte Luftmenge entweichen lassen, dann wieder schließen.

## 3. Anwendung

- Kissen mit der ergonomisch geformten Seite nach oben auf die gewünschte Sitzfläche legen (z. B. Stuhl, Sitzbank, Campingstuhl).
- Setzen Sie sich mittig auf das Kissen. Gegebenenfalls Härte durch erneutes Öffnen/Schließen des Ventils nachjustieren.

#### **4. Zusammenfalten & Transport**

- Zur Mitnahme das Ventil wieder öffnen.
- Das Kissen der Länge nach langsam und gleichmäßig von der der Ventilseite abgewandten Seite *hin zum Ventil* zusammenfalten und die Luft herausstreichen. So entweicht die Luft restlos.
- Ventil schließen. Sitzkissen zusammengefaltet im Transportbeutel verstauen.

#### **5. Pflege und Wartung**

- Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Nicht in der Maschine waschen, nicht bügeln.
- Vor direkter Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 60 °C schützen.
- Kontakt mit scharfen/spitzen Gegenständen vermeiden, um Beschädigungen zu verhindern.

#### **6. Hinweise**

- Die Luftfüllung sollte regelmäßig kontrolliert und an Umgebung sowie persönlichen Komfort angepasst werden.
- Das Material ist wasserabweisend und widerstandsfähig.
- Für alle Altersgruppen geeignet, optimal für Reisen, Outdoor, Büro, Veranstaltungen, Wanderungen und bei Rückenproblemen.

#### **Vorteile:**

- Ultraleicht und extrem kompakt (passt in Hosentasche oder Handtasche).
- Ergonomische Druckentlastung – schützt Steißbein und Wirbelsäule.
- Selbsterklärend, ohne technische Hilfsmittel einsatzbereit.

Bei weiteren Fragen empfiehlt TecSeat die die FAQ/Bedienungsanleitungen auf der Hersteller-Webseite unter [www.tecseat.de](http://www.tecseat.de)