

Gebrauchsanleitung für den SoftAirSeat Pro

Der **SoftAirSeat Pro** von TecSeat ist ein orthopädisches Sitzkissen mit 20 individuell anpassbaren Luftkammern, das maximale Ergonomie und individuellen Komfort bietet.

1. Lieferumfang prüfen

- SoftAirSeat Pro Sitzkissen
- (optional) Schutzüberzug (SoftAirSeat Cover im Online-Shop www.tecseat.de erhältlich)
- Anleitung hinten auf der Verpackung

2. Inbetriebnahme und Anpassung

- Entnehmen Sie das Sitzkissen und platzieren Sie es auf eine ebene Sitzfläche (z.B. Bürostuhl, Autositz, Rollstuhl).
- Prüfen Sie, dass das Ablassventil (hinten rechts auf der Unterseite) geschlossen ist.
- Zur **Luftbefüllung** nutzen Sie die integrierte Luftpumpe (INFLATE):
 - Drücken Sie mehrfach den Pumpknopf (INFLATE), bis die gewünschte Sitzhärte und Höhe erreicht sind.
 - Mehr Luft = festeres, höheres Sitzgefühl.
 - Weniger Luft = weicheres, niedrigeres Sitzen.
- Zur **Feinjustierung** kann über das Ablassventil (DEFLATE) gezielt Luft abgelassen werden.
- Setzen Sie sich mittig auf das Kissen, passen Sie die Luftfüllung ggf. nochmals an, bis Sie optimalen Komfort erreichen.

3. Optimale Sitzposition & Besonderheiten

- Die spezielle Kontur entlastet gezielt Steißbein und Sitzbeinhöcker, fördert eine aufrechte Haltung und schont die Wirbelsäule.
- Die 20 Einzelkammern verteilen den Druck individuell – bei Bewegungen passen sie sich dynamisch an.
- Die Silikonknoppen an der Unterseite verhindern Verrutschen.

4. Einsatzbereiche

- Für Büro, Auto, Rollstuhl, Stadion, Reisen und lange Sitzzeiten.
- Besonders geeignet bei Rückenproblemen und für ergonomisches, dynamisches Sitzen.

5. Zusammenfalten & Transport

- Über das Ablassventil die Luft vollständig ablassen (DEFLATE drücken, während Sie darauf sitzen).
- Kissen von einer Seite zur anderen langsam falten/rollen.
- Gut verschlossen und platzsparend im Rucksack oder einer Tasche verstauen.

6. Pflege & Wartung

- Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen, bei Bedarf mildes Reinigungsmittel verwenden.^[1]
- Kein Waschen in der Maschine, nicht bügeln.
- Vor direkter Hitze und scharfen Gegenständen schützen.
- Optional kann ein separat erhältlicher Schutzüberzug verwendet werden.

7. Hinweise

- Sitzhärte regelmäßig prüfen und der Umgebungstemperatur sowie dem persönlichen Komfortempfinden anpassen.
- Für Erwachsene und Kinder gleichermaßen geeignet.
- Für Personen mit Rücken- und Sitzproblemen ärztlich empfohlen und von unabhängigem Institut zertifiziert (IGR nach DIN EN ISO 26800 / EN ISO 15537).

Hauptvorteile:

- Orthopädisch wirksam, individuell anpassbar, hohe Ergonomie
- Schnell einsatzbereit, ideal für jede Sitzgelegenheit
- Geringes Gewicht (ca. 300g), leicht zu transportieren
- Druckentlastend, rutschfest, einfach zu pflegen